

## Informace o produktu Destix Med N



**DESTIX® Med N** sada produktů pro rychlou desinfekci:

- neobsahuje aldehydy, formaldehydy, fenoly
- má mycobactericidální, tuberculocidální účinnost
- účinné za 1 minutu
- dostupná neutrální a příjemná citronová vůně
- rychleschnoucí

### **1. Všeobecné informace**

DESTIX® Med N - desinfekční prostředek i ubrousky jsou určeny k rychlému čištění, desinfekci ploch, povrchů zdravotnických prostředků, zdravotnických středisek, lékařských ordinací, nemocnic a domácností (například vyšetřovacích křesel, rukojetí). Desinfekční prostředek ani ubrousky se nesmí používat na lékařské nástroje určené k operacím nebo naslouchadla.

Vhodné také pro plošnou desinfekci tělocvičen, fitness center, lázní a všech dalších zařízení, které vyžadují každodenní úklid a rychlou desinfekci.

DESTIX® Med N desinfekční prostředek a ubrousky jsou účinné proti bakteriím (včetně MRSA), plísním (*Candida Albicans*, *Aspergillus niger*) virům (BVDV, Vaccina). Výrobek má mycobactericidální a tuberculocidální účinnost (*M. Terrae*, *M. Avium*).

Doba působení: 1 minuta

DESTIX® Med N desinfekční prostředek a ubrousky jsou dostupné v neutrální a též příjemnou vůni.


Desinfekční prostředek neobsahuje aldehydy, formaldehydy ani fenoly.

### **2. Návod k použití**

Důkladně přetřete povrch vlhčeným ubrouskem Destix, nechte působit 1 minutu, pak povrch dosušte čistou suchou jednorázovou utěrkou. Před aplikací si důkladně přečtěte pokyny uvedené na etiketě výrobku a pokyny výrobce.

DESTIX® Med N desinfekční sada není určena pro materiály citlivé na alkohol, jako je například akrylové sklo.

Ubrousky:

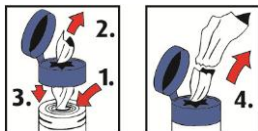

Instrukce: Při prvním použití otevřete víčko dózy. Odstřihněte vrchní část plastového sáčku, ve kterém jsou ubrousky zataveny. Ubrousky ze sáčku nevytahujte. Ze středu roličky vytáhněte první ubrousek, protáhněte ho otvorem víčka a dózu opět uzavřete. Ubrousky odtrhávejte kolmo přes hranu otvoru. Po použití víčko dozy vždy uzavřete.

Roztok:

Nalijte roztok na jednorázovou osušku a celý povrch kompletně navlhčete. Povrchy by se během reakce nemely otírat suchými utěrkami.

Kleinmann GmbH  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbühl  
Tel. +49 (0) 7128 / 9292-0 Fax -92  
e-mail info@Kleinmann.net  
www.Kleinmann.net

Geschäftsführer / MD:  
Paul Barnard  
Stephen Rowell  
Amtsgericht Reutlingen  
HRB-Nr. 1903

Bank:  
Commerzbank AG  
BLZ 640 400 33  
Kto. Nr. 42 00663 00  
BIC COBADEFF  
IBAN: DE62 6404 0033 0420 0663  
00



## Informace o produktu Destix Med N



### 3. Účinnost a doba působení

Informace týkající se desinfekčního prostředku Destix® Med N:

<b>Mikroorganismy:</b>	<b>Doba působení:</b>
Staphylococcus aureus + MRSA	1 minuta
Escherichia coli	1 minuta
Enterococcus hirae	1 minuta
Pseudomonas aeruginosa	1 minuta
Proteus mirabilis	1 minuta
Candida albicans	1 minuta
Mycobacterium terrae	1 minuta
Mycobacterium avium	1 minuta
Aspergillus niger	1 minuta
BVDV	1 minuta
Vaccina	1 minuta
H1N1	15 sec

#### Baktericidní účinek

**Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Proteus mirabilis**

Prof.Dr. med Ralph Schubert, specialista na hygienu a environmentalní medicinu, odborný posudek dle normy DGHM/VAH, 20.04.2009, Staphylococcus aureus, Escherichia hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, P.mirabilis, Candida Albicans

Prof.Dr. med.Dr.phil.Egon Marth, specialista na hygienu a environmentalní medicinu, odborný posudek dle normy DGHM/VAH, zapsán 11.05.2009, Staphylococcus aureus, Escherichia hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa, P.mirabilis, Candida Albicans, Escherichia faecium

**Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae:**

Chemila Chemical and Microbiological Laboratory, zpráva o výsledku testu účinnosti roztoku Destix Med N, 07.2012, EN 1276

#### **Mycobacterium terrae**

Prof.Dr. med.Dr.phil.Egon Marth, Mycobacterium terrae DGHM/VAH, zapsáno 20.10.2009

Kleinmann GmbH  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbühl  
Tel. +49 (0) 7128 / 9292-0 Fax -92  
e-mail info@Kleinmann.net  
www.Kleinmann.net

Geschäftsführer / MD:  
Paul Barnard  
Stephen Rowell  
Amtsgericht Reutlingen  
HRB-Nr. 1903

Bank:  
Commerzbank AG  
BLZ 640 400 33  
Kto. Nr. 42 00663 00  
BIC COBADEFF  
IBAN: DE62 6404 0033 0420 0663  
00



## Informace o produktu Destix Med N



### **Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium**

Chemila Chemical and Microbiological Laboratory, zpráva o výsledku testu účinnosti roztoku Destix Med N, 07.2012, EN 14348

### **Fungicidní účinek**

#### **Candida albicans:**

Prof.Dr. med Ralph Schubert, specialista na hygienu a environmentalní medicinu, odborný posudek dle normy DGHM/VAH, zapsán 20.04.2009

Prof.Dr. med.Dr.phil.Egon Marth DGHM/VAH, zapsáno 20.05.2009

#### **Candida albicans, Aspergillus niger:**

Chemila Chemical and Microbiological Laboratory, zpráva o výsledku testu účinnosti roztoku Destix Med N, 07.2012, EN 1650

### **Virucidní účinek**

#### **BVDV**

Chemila Chemical and Microbiological Laboratory, Zpráva o výsledku testu účinnosti roztoku Destix Med N, 07.2012, EN 14476+A1

#### **Vaccina**

Chemila Chemical and Microbiological Laboratory, Zpráva o výsledku testu účinnosti roztoku Destix Med N, 07.2012, EN 14476+A1


#### **H1N1**

Dr. Jochen Steinmann, Microlab GmbH, efektivita Destix Med N proti Influenza A H1N1 viru s množstevním přerušením testu v souladu s EN 14476.

#### **4. Materiální test:**

DESTIX® Med N desinfekční sada není určena pro materiály citlivé na alkohol, jako je například akrylové sklo!!!

#### **5. Návod na použití**

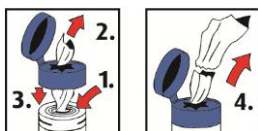

Instrukce: Při prvním použití otevřete víčko dózy. Odstříhnete vrchní část plastového sáčku, ve kterém jsou ubrousky zataveny. Ubrousky ze sáčku nevytahujte. Ze středu roličky vytáhněte první ubrousek, protáhněte ho otvorem víčka a dózu opět uzavřete. Ubrousky odtrhávejte kolmo přes hranu otvoru. Po použití víčko dozy vždy uzavřete.

Kleinmann GmbH  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbühl  
Tel. +49 (0) 7128 / 9292-0 Fax -92  
e-mail info@Kleinmann.net  
www.Kleinmann.net

Geschäftsführer / MD:  
Paul Barnard  
Stephen Rowell  
Amtsgericht Reutlingen  
HRB-Nr. 1903

Bank:  
Commerzbank AG  
BLZ 640 400 33  
Kto. Nr. 42 00663 00  
BIC COBADEFF  
IBAN: DE62 6404 0033 0420 0663  
00



## Informace o produktu Destix Med N



Důkladně přetřete povrch vlhčeným ubrouskem Destix, nechte působit 1 minutu, pak povrch dosušte čistou suchou jednorázovou utěrkou. Před aplikací si důkladně přečtěte pokyny uvedené na etiketě výrobku a pokyny výrobce.

### 6. Balení a velikosti:

Kód produktu	Popis produktu	Karton (ks)	1 utěrka vyčistí plochu o rozměry až:
	<b>DESTIX® Med N vlhčené ubrousky</b>		
DX1212	Dávkovací uzavíratelná dóza obsahující 120 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Ubrousky jsou navíc zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání. Rozměr ubrousků: 13x20 cm.	12	30 x 30 cm
DX2212	Náhradní plnění dózy DX1212 obsahující 120 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Baleno v ochranném plastovém obalu. Rozměr ubrousků: 13x20 cm	12	30 x 30 cm
DX1214	Dávkovací uzavíratelná dóza Jumbo obsahující 200 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Ubrousky jsou navíc zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání. Rozměr ubrousků: 21x26 cm.	6	45 x 45 cm
DX2214	Náhradní plnění dózy DX1214, obsahující 200 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Ubrousky jsou navíc zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání. Rozměr ubrousků: 21x26cm	6	45 x 45 cm
DX1215	Dávkovací dóza obsahující 150 wet wipes, vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Baleno v ochranném plastovém obalu. Rozměr ubrousků: 28x28cm.	6	55 x 55 cm
	<b>DESTIX® Med N vlhčené ubrousky LEMON</b>		
DX1222	Dávkovací uzavíratelná dóza obsahující 120 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Ubrousky jsou navíc zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání. Rozměr ubrousků: 13x20cm	12	30 x 30 cm
DX2222	Náhradní plnění dózy DX1222 obsahující 120 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Baleno v ochranném plastovém obalu. Rozměr ubrousků: 13x20cm	12	30 x 30 cm
DX1224	Dávkovací uzavíratelná dóza Jumbo obsahující 200 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Ubrousky jsou navíc zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání. Rozměr ubrousků: 21x26 cm.	6	45 x 45 cm
DX2224	Náhradní plnění dózy DX1224, obsahující 200 ks vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Ubrousky jsou navíc zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání. Rozměr ubrousků: 21x26cm	6	45 x 45 cm

Kleinmann GmbH  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbühl  
Tel. +49 (0) 7128 / 9292-0 Fax -92  
e-mail info@Kleinmann.net  
www.Kleinmann.net

Geschäftsführer / MD:  
Paul Barnard  
Stephen Rowell  
Amtsgericht Reutlingen  
HRB-Nr. 1903

Bank:  
Commerzbank AG  
BLZ 640 400 33  
Kto. Nr. 42 00663 00  
BIC COBADEFF  
IBAN: DE62 6404 0033 0420 0663  
00



## Informace o produktu Destix Med N



DX1225	Dávkovací dóza obsahující 150 wet wipes, vlhčených ubrousků napuštěných roztokem Destix Med N. Baleno v ochranném plastovém obalu. Rozměr ubrousků: 28x28cm.	6	55 x 55 cm
	<b>DESTIX® Med N roztok *</b>		
DX3210	Povrchový desinfekční roztok Destix Med N, 1000ml, láhev se šroubovacím víčkem.	8	-
DX3220	Povrchový desinfekční roztok Destix Med N, 5,000ml, plechovka se šroubovacím víčkem.	-	-
DX3230	Povrchový desinfekční roztok Destix Med N, 10.000ml, plechovka se šroubovacím víčkem.	-	-
	<b>DESTIX® Med N LEMON roztok *</b>		
DX3211	Povrchový desinfekční roztok Destix Med N, 1000ml, láhev se šroubovacím víčkem.	8	-
DX3221	Povrchový desinfekční roztok Destix Med N, 5,000ml, plechovka se šroubovacím víčkem.	-	-
DX3231	Povrchový desinfekční roztok Destix Med N, 10.000ml, plechovka se šroubovacím víčkem.	-	-

\* Doporučujeme použít DESTIX® Med N roztoky v kombinaci s naším systémem doplňování ubrousků - refill DX2015, DX2016 (role suchých utěrek pro kyblíky)

### 7. Upozornění

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Výrobek používejte s opatrností. Před aplikací si pečlivě přečtete pokyny uvedené na etiketě výrobku a pokyny výrobce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití ubrousek uložte na místo určené k likvidaci odpadu. Obal je možné po důkladném vypláchnutí použít opakovaně nebo předat k recyklaci. Nepoužívat po datu expirace!

Po požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Ukažte jim etiketu výrobku.

Pozor! Pokud se výrobek dostane do přímého kontaktu s kůží, ihned místo vysušte látkou absorbující vlhkost.

Vysoce hořlavé. Obsahuje vonné látky.

Výrobek používejte pouze pro produkty odolné vůči alkoholu, nepropustné povrchy.

### 8. Složení

Aktivní látky:

100 g desinfekčního roztoku obsahuje:

40,0 g Ethanol, 9,5 g n-propanol, 2g Butanol

0,25g Alkylbenzylidimethylammoniumchlorid; 0,25g Alkylethylbenzylidimethylammoniumchlorid

0,25g Didecyldimethylammoniumchlorid

### 9. Registrace

Zdravotnický prostředek zařazen do třídy II.a dle platné evropské legislativy (CE 0483)

Registrováno jako biocidní produkt

Produkt je evidován v DGHM/VAH.

Kleinmann GmbH  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbühl  
Tel. +49 (0) 7128 / 9292-0 Fax -92  
e-mail info@Kleinmann.net  
www.Kleinmann.net

Geschäftsführer / MD:  
Paul Barnard  
Stephen Rowell  
Amtsgericht Reutlingen  
HRB-Nr. 1903

Bank:  
Commerzbank AG  
BLZ 640 400 33  
Kto. Nr. 42 00663 00  
BIC COBADEFF  
IBAN: DE62 6404 0033 0420 0663  
00



## Informace o produktu Destix Med N



### **10. Trvanlivost**

Minimální trvanlivost výrobku je 2 roky od data výroby roztoku.

Datum výroby a lot-nr. jsou vytištěny na výrobku.

Doba užití po otevření je 6 měsíců.

### **11. Výhody ubrousků oproti roztokům**

- Vhodnější a ekonomičtější z důvodu použití pouze jednoho produktu místo dvou
- Výrobek je okamžitě připraven pro použití, koncový uživatel tak nemůže udělat chybu při dávkování roztoku
- Zákazník kupuje a skladuje pouze jeden výrobek místo dvou
- Výjimečná struktura materiálu, ze kterého je ubrousek zhotoven, je plně kompatibilní s roztokem a nesnižuje tak jeho desinfekční účinek
- Výrobek je šetrný k pokožce, není potřeba používat bezpečnostní rukavice
- Evropská legislativa směřuje k omezování používání desinfekčních prostředků ve formě roztoků, jelikož při jejich aplikaci dochází k rozprašování roztoku do vzduchu, které může následně způsobovat u lidí dýchací potíže

Kleinmann GmbH  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbühl  
Tel. +49 (0) 7128 / 9292-0 Fax -92  
e-mail info@Kleinmann.net  
www.Kleinmann.net

Geschäftsführer / MD:  
Paul Barnard  
Stephen Rowell  
Amtsgericht Reutlingen  
HRB-Nr. 1903

Bank:  
Commerzbank AG  
BLZ 640 400 33  
Kto. Nr. 42 00663 00  
BIC COBADEFF  
IBAN: DE62 6404 0033 0420 0663  
00

